

Eigenschaften

Optishade ist ein Kolorimeter, ein optoelektronisches Gerät, das Farben im dentalen Farbraum misst. Optishade funktioniert ausschließlich mit einem iPhone oder einem iPad (nicht im Lieferumfang enthalten).

SEHR WICHTIG: Ihr Optishade ist ein Gerät mit fortschrittlicher Technologie, das mit äußerster Sorgfalt behandelt werden muss. Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch Ihres Optishade entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Made for



Geräteabmessungen	Breite: 51 mm Durchmesser: 81,5 mm Gewicht: 60 g
iOS-Kompatibilität	Kompatibel mit allen Geräten, auf denen iOS / iPadOS 17 oder eine neuere Version läuft
Stromversorgung	400 mAh wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Autonomie der Batterie	4 bis 6 Stunden Nutzungsdauer 300 Tage Standby-Zeit



#70100-OS-BT-07/2025



Smile Line SA
Z.I. La Clef, 5
CH-2610 St. Imier
Switzerland
+41 32 944 22 44
mail@smileline.ch
www.smileline.ch

Verpackungsinhalt

- Optishade Gerät, komplett mit Führungskonus und Kalibrierkappe
- 4 Führungskoni
- 4 Kalibrierkappen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 USB-C-Ladekabel
- 1 USB-C-auf-USB-A-Adapter
- 30 Tage kostenlose Lizenz für Matisse



NICHT STERIL. SIEHE ABSCHNITT
REINIGUNG
UND DESINFEKTION

WARNUNG! Eine Kalibrierungskarte befindet sich im Inneren der Kalibrierungsabdeckung. Die Kalibrierungskarte ist extrem zerbrechlich und empfindlich. Berühren Sie es unter keinen Umständen mit den Fingern, da Sie sonst Gefahr laufen, es zu verschmutzen. Die Kalibrierungsabdeckung kann nicht desinfiziert oder sterilisiert werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob er sauber ist oder die Gefahr einer Kreuzkontamination besteht, entsorgen Sie ihn bitte sofort und nehmen Sie einen neuen.

WARNUNG! Jede Komponente hat nur eine mögliche Montageposition. Es wird empfohlen, dass Sie üben, um die Prinzipien der Montage zu verstehen.






WARNUNG! Versuchen Sie niemals, die Optishade-Basis zu öffnen. Es ist versiegelt und das Öffnen führt zum Erlöschen der Herstellergarantie. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Basis Ihres Optishades eindringt.

SEHR WICHTIG! Schäden, die durch das Eindringen von Flüssigkeit in den Sockel Ihres Optishade verursacht werden, sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Quick Start Guide



1. Laden Sie das Gerät vollständig auf.

 <p>Keine Anzeige: OPTISHADE ist AUS Wenn die LED-Anzeige von OPTISHADE beim Anschluss an ein Kabel ausbleibt, wird das Gerät nicht geladen.</p>	 <p>Blau: OPTISHADE wird über Bluetooth verbunden / ist verbunden. Bitte prüfen Sie den Verbindungs- und Kalibrierstatus in der App.</p>
 <p>Orange: Batteriefehler. Gerät trennen, 5 Min. warten, erneut anschließen. Leuchtet LED weiter orange, Support kontaktieren.</p>	 <p>Grün: OPTISHADE ist vollständig geladen.</p>
 <p>Rot: OPTISHADE wird geladen.</p>	<p>Hinweis: OPTISHADE verfügt über einen internen Pufferakku, der vor der ersten Messung vollständig geladen sein muss. Ist der Akku vollständig entladen, kann das Aufladen bis zu drei Stunden dauern. Es ist normal, dass nach kurzer Ladezeit bereits eine Verbindung möglich ist, Messungen jedoch noch nicht durchgeführt werden können.</p>

2. Laden Sie die kostenlose Anwendung Optishade herunter.



3. Verbinden Sie Optishade mit einem iOS-Gerät und folgen Sie den Anweisungen in der App.



4. Kalibrieren Sie, nehmen Sie die Abdeckung ab und starten Sie die Messung.

