

### Características

Optishade es un colorímetro digital que mide con alta precisión y repetibilidad los colores del espacio cromático dental. Optishade funciona exclusivamente con un iPhone o un iPad (no incluidos).

**MUY IMPORTANTE:** Su Optishade es un dispositivo de tecnología avanzada que debe ser manejado con el máximo cuidado. Cualquier problema derivado de un uso inadecuado o del abuso de su Optishade no está cubierto por la garantía. **[garantía: 1 año].**

Made for

 **iPhone**  **iPad**

Dimensiones del dispositivo	Longitud 51 mm Diámetro 81,5 mm Peso 60g
Funciona con iOS	iPhone, iPad
Fuente de alimentación	Batería recargable de litio ión 400 mAh
Duración de la batería	4 a 6 horas de uso 300 días en modo de espera

### Contenido

- 1 unidad OPTISHADE montada con cono de captura y tapa de calibración
- 4 conos de captura
- 4 tapas de calibración
- 1 folleto de instrucciones
- 1 cable de carga USB-C
- 1 adaptador USB-C a USB-A
- 30 días de licencia gratuita Matisse



NO ESTERIL. CONSULTAR LA SECCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN EL MANUAL DEL USUARIO.

**ADVERTENCIA** En el interior del tapón de calibración se encuentra la tarjeta de calibración. Esta tarjeta es extremadamente frágil y sensible. En ningún caso se debe tocar con los dedos o mancharla. El tapón no se puede desinfectar ni esterilizar. Si no está seguro de su limpieza o existe cualquier riesgo de contaminación cruzada, deséchelo inmediatamente y reemplázelo por uno nuevo.

**ADVERTENCIA** Cada componente de Optishade tiene una única posición de montaje posible. Se recomienda practicar el ensamblaje de las piezas para evitar forzarlas.

**ADVERTENCIA** No intentar abrir nunca la base de Optishade. La base está sellada y abrirla anula automáticamente la garantía del fabricante. Evitar la infiltración de líquidos en la base de Optishade.

**¡MUY IMPORTANTE!** Cualquier daño causado por penetración de líquidos en la base de Optishade no está cubierto por la garantía del fabricante.

### Guía de inicio rápido




#70100-05-BT-07/2025



Smile Line SA  
Z.I. La Clef, 5  
CH-2610 St. Imier  
Switzerland  
+41 32 944 22 44  
mail@smileline.ch  
www.smileline.ch

## 1. Cargue completamente la unidad.

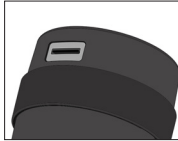

Sin luz: OPTISHADE está APAGADO. Si el indicador luminoso del OPTISHADE está apagado cuando está conectado con un cable, significa que no se está recargando.



Azul: OPTISHADE en proceso de conexión / conectado via Bluetooth. Compruebe el estado de la conexión / calibración en la aplicación.



Naranja: Error de batería, desconecte el dispositivo, espere 5 minutos y vuelva a conectarlo a un cargador. Si el indicador naranja sigue encendido, póngase en contacto con el servicio de asistencia.



Verde: OPTISHADE está completamente cargado.



Rojo: OPTISHADE se está cargando.

Nota: OPTISHADE tiene una batería de reserva residual que debe recargarse antes de poder realizar mediciones. Si la batería está completamente descargada, la recarga puede tardar hasta tres horas. Es normal que, tras una recarga breve, sea posible conectarse, pero que no se puedan realizar mediciones.

## 2. Descargue gratuitamente del App Store la aplicación de Optishade.



## 3. Conecte Optishade a un dispositivo iOS y siga las instrucciones de la aplicación.



## 4. Calibre, retire la tapa y comience a medir.

